

Hartelijk dank dat u voor Auditio heeft gekozen! In deze handleiding vindt u een beschrijving van Auditio en wordt een aantal tips voor het gebruik van Auditio gegeven.



B A B B L E



Technische specificaties

- In het oor toestel
- Volledig digitaal
- Verwisselbaar NoWax filter
- 4 Programma's
- Feedback cancellation
- Compressor
- 1 microfoon
- Gewicht 3 gram
- Maximale output 110 dB
- Frequentiebereik 200 - 6 kHz
- Aluminium opberghoos
- 1 batterij, type zink-lucht 10

Hoe Auditio te gebruiken:


Open de Aluminium opberghoos en haal Auditio uit het schuim, het toestel is nog uitgeschakeld. Auditio wordt geleverd met drie verschillende maten oorplugs (Small / Medium / Large). Het is voor de goede werking van belang dat u een oorplug gebruikt die zo goed mogelijk aansluit op uw oor, standaard is Auditio voorzien van de Medium oorplug. Indien Auditio hiermee echter erg los in uw oor zit of snel rondzingt, u hoort dan een luide fluittoon, probeert u dan de grotere (Large) oorplug. Voelt Auditio daarentegen te strak aan en ervaart u dit als knellend of pijnlijk, probeer dan de kleinere oorplug (Small). Voor een goede werking plaatst u Auditio voorzichtig in uw oor zodat het comfortabel aanvoelt en de gehoorgang toch goed afgesloten is, de geluidsterkteregelaar zit dan aan de achterkant, Auditio zit prettiger indien u het oorrubbertje eerst bevochtigd met de tong. Indien u aan een lage versterking genoeg heeft, kunt u proberen om Auditio zonder oorplug te gebruiken, dit heeft het voordeel dat het oor niet afgesloten wordt, dit voelt in veel gevallen natuurlijker aan. Nadeel is dat het toestel eerder gaat rondzingen, fluiten, en eerder uit het oor zal vallen.

In- en uitschakelen en volume verhogen

Auditio bevat slechts één bedieningsknop en een bedieningswiel, dit maakt Auditio zeer eenvoudig in gebruik. Dit wielje betreft zowel de aan/uit schakelaar als volumeregelaar. Zorg ervoor dat Auditio zich op de juiste manier in het oor bevindt alvorens Auditio in te schakelen. Draai het wielje rustig met de klok mee, een lichte klik is hierbij voelbaar, Auditio is ingeschakeld. Indien een hoger volume gewenst is, draai dan het wielje verder, doe dit rustig totdat het gewenste niveau is bereikt. Het uitschakelen van Auditio wordt bereikt door het naar achteren draaien van het wielje totdat een lichte klik voelbaar is. Het wielje kan niet verder, Auditio is uitgeschakeld. Een luide fluittoon wordt in principe direct weg geregeld door de feedbackcancellation, een aanhoudende fluittoon kan betekenen dat het volume te hoog is ingesteld of dat de oorplug de gehoorgang niet goed afsluit. Pas de positie van Auditio aan door deze dieper in het oor te duwen, maak eventueel gebruik van een andere (beter passende) oorplug of reduceer het volume om dit probleem op te lossen. Indien u maximale versterking wenst kunt u ook een speciaal oorstukje laten maken.

Programmamekeuze

Door kortstondig op het kleine knopje te drukken wisselt u van programma, u hoort dan een tot vier pieptoonjes om aan te geven welk programma is ingeschakeld. De programma's hebben een toenemende hoeveelheid hoge tonen en compressie, dit laatste is het minder versterken van plotselinge harde geluiden. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid lage tonen steeds minder naarmate u een hoge programma kiest. Welk programma u het best kunt gebruiken is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke voorkeur.

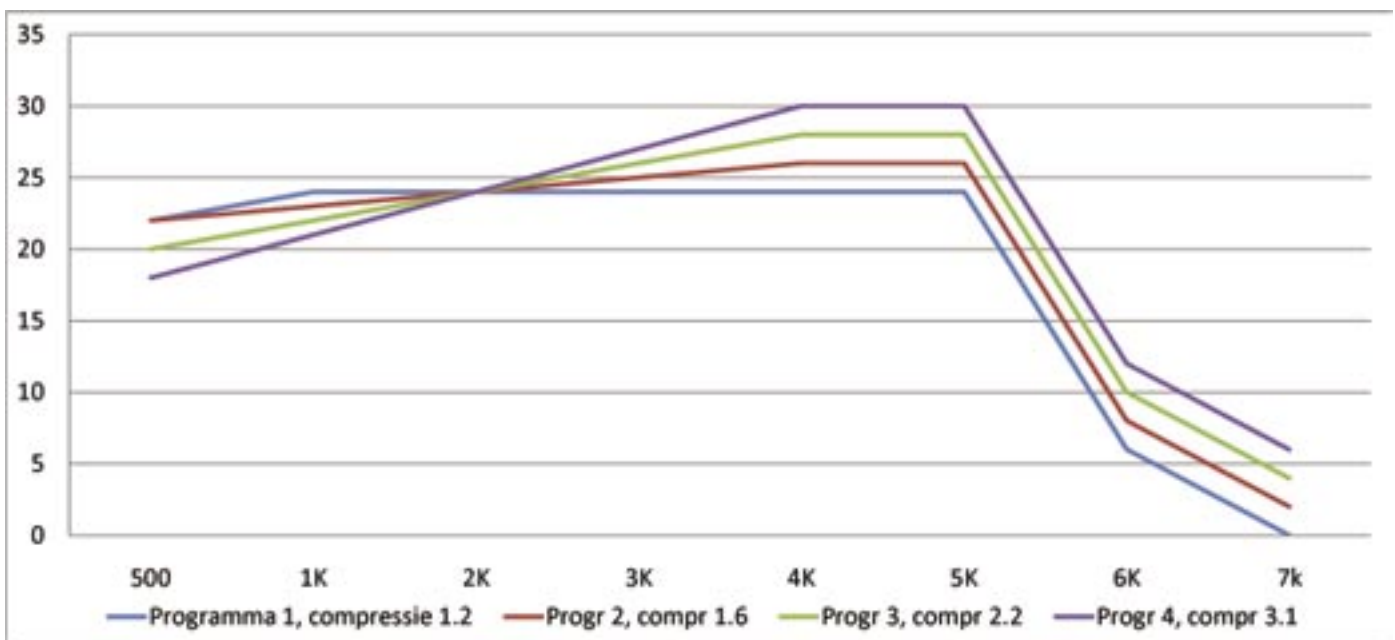

Verwisselen van de batterij

Het batterijklepje is klein en kwetsbaar, buig het niet. Houdt Auditio losjes vast, open het batterijklepje door het enigzins in te duwen aan het uiteinde. Plaats de nieuwe batterij zoals aangegeven: de zijde met de uitstulping (de minzijde) naar het oorrubbertje gericht, de platte zijde (pluszijde) is dan naar buiten gericht (vergeet niet de sticker die zich aan deze kant bevindt te verwijderen voor gebruik). Sluit het batterijklepje voorzichtig. Aanbevolen is de standaard zink-lucht batterij type 10.



Verwisselen van het NoWax filter

Nieuwe NoWax filters kunt u bestellen via de website. Voor het verwisselen van het oorsmeerfilter gebruikt u het bij de nieuwe filters geleverde plastic gereedschapje. Dit gereedschapje heeft 2 kleine uitstulpingen, het ene is om het oude filter te verwijderen, het nieuwe filter bevindt zich op het andere. U steekt het lege uitstulpingkje in het wasfilter van de Auditio en trekt het gereedschap vervolgens rustig terug, dit zal het oude meenemen. Vervolgens steekt u het uitstulpingkje met het nieuwe wasfilter in de Auditio en trekt het gereedschap weer rustig terug. Het nieuwe filter is nu geplaatst.



Onderhoud

Auditio is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om.

De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen kunnen corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan zich ophopen, de werking kan hierdoor verminderen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet of koud is. Extreme temperaturen zullen de levensduur bekorten.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die zeer licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN:



GEBRUIK AUDITIO VERSTANDIG

Auditio bevat zeer kleine onderdelen. Houdt Auditio in verband met verstikkingsgevaar buiten het bereik van kleine kinderen.

STEL HET GELUIDSNIVEAU NIET TE HOOG IN

Afgeraden wordt om Auditio in extreem luidruchtige omgevingen te gebruiken.

- Stel het geluidsniveau niet voldoende hoog in voor een goede verstaanbaarheid;
- Suizende oren geven mogelijk een te hoog geluidsniveau aan. Verminder het geluidsniveau.

GEZONDHEID

Babble raadt u aan om uw oren regelmatig door een erkend audioloog te laten controleren.

Als u één van de volgende zaken ervaart, stop dan met het gebruik van Babble totdat een audioloog uw oren heeft onderzocht:

- sterke verslechtering van het gehoor;
- overmatige opbouw van oorsmeer;
- bij overgevoeligheid, infecties of allergische reacties.

HYGIENE

Houd Auditio schoon. Reinig Auditio na elk gebruik voor een optimale werking. In verband met persoonlijke hygiëne, deel het gebruik van Auditio niet met andere personen.

Veeg de oorplugs schoon met een antiseptisch middel zowel voor als na gebruik om infecties te voorkomen. De rubberen oorplugs kunnen ook met een zacht sopje gereinigd worden.

INTERFERENTIE

Auditio kan in principe beïnvloed worden door sterke interferentie signalen.

GARANTIE

Op Auditio wordt een volledige garantie voor de periode van 1 jaar gegeven. Indien u gebruik wenst te maken van de garantie dient Auditio te worden ingeleverd bij uw leverancier vergezeld van de originele aankoopbon.

Uitgesloten van de garantie zijn:

- schade door onoordeelkundig of onachtzaam gebruik;
- schade als gevolg van onderhoud of reparaties door onbevoegden

Babble verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product Auditio conform is aan de bepalingen van de volgende richtlijnen van de Raad; Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) (89/336/EEG; 92/31/EEG; 93/68/EEG) en Medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Copyright Babble 2009. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte daarvan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babble is verboden. In geen geval is Babble aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijk recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel.

Babble
van Diemenstraat 410
Unit -1.16
1013 CR Amsterdam
Tel: 020-6383788
email: info@babble.nl
web: www.babble.nl