

Herzlichen Dank, dass Sie sich für Club entschieden haben! In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Beschreibung von Club. Darüber hinaus werden eine Reihe nützlicher Tipps für den Gebrauch von Club gegeben.



**CLUB**

#### **Technische Ausstattung**

- 4-Element Array-Mikrofon
- Richtfunktion DI 10dB
- Verstärkung 40 dB
- Eingebauter Kompressor
- Maximaler Output 105 dB
- Frequenzbereich 400 - 5 kHz
- Gewicht 8 Gramm
- Länge 9 cm
- 2 Batterien, Typ Zink-Air 13
- Aluminiummetui



#### **WICHTIGE BETRIEBUNGSHINWEISE (BITTE VOR GEBRAUCH LESEN):**

##### **VERWENDEN SIE CLUB VERNÜNFTIG**

Club ist dazu gedacht, die Verständlichkeit von Gesprächen in Situationen zu erhöhen, in denen diese Verständlichkeit durch Umgebungsgeräusche erschwert wird. Gleichzeitig kann Club für die Verstärkung von Ton gebraucht werden, z. B. im Theater oder zu Hause beim Fernsehen. Club enthält sehr kleine Teile. Halten Sie darum Club aufgrund möglicher Erstickungsgefahr von kleinen Kindern fern.

##### **STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE NICHT ZU HOCH EIN**

Es wird davon abgeraten, Club in extrem lauter Umgebung zu gebrauchen.

- Stellen Sie die Lautstärke genau ausreichend für eine gute Verständlichkeit ein;
- Bei Ohrensausen wird möglicherweise eine zu hohe Lautstärke angegeben. Verringern Sie dann die Lautstärke.

##### **GESUNDHEIT**

Creaties in Technik empfiehlt Ihnen, Ihre Ohren regelmäßig von einem Ohrenarzt kontrollieren zu lassen.

Falls einer der folgenden Fälle eintritt, stoppen Sie dann mit dem Gebrauch von Club bis ein Ohrenarzt Ihre Ohren untersucht hat:

- Zweifel über die Verschlechterung Ihres Gehörs;
- starke Verschlechterung des Gehörs;
- übermäßige Ansammlung von Ohrenschmalz;
- bei Überempfindlichkeit oder allergischen Reaktionen.
- bei Infektionen.

##### **HYGIENE**

Halten Sie Club sauber. Verleihen Sie aus hygienischen Gründen Club nicht an andere Personen. Um Infektionen zu vermeiden, wischen Sie die Ohrstöpsel vor und nach Gebrauch mit einem antiseptischen Mittel ab.

##### **VERKEHRSSICHERHEIT**

Aufgrund der isolierenden Wirkung der Ohrstöpsel, wird davon abgeraten, Club im Verkehr oder in jeglicher anderen Situation zu verwenden, in der Isolation des Umgebungsgeräusches zu gefährlichen Situationen führen kann.

##### **INTERFERENZ**

Club kann im Prinzip durch starke Interferenzsignale beeinflusst werden.

Verwenden Sie Club nicht gleichzeitig mit Ihrem Handy am selben Ohr.

##### **SACHVERSTÄNDIGE WARTUNG**

Lassen Sie nur befugtes Servicepersonal das Gerät reparieren.

##### **GARANTIE**

Auf Club erhalten Sie ein Jahr vollständige Garantie. Wenn Sie Anspruch auf die Garantie erheben wollen, müssen Sie Club zusammen mit der Original-Rechnung bei Ihrem Lieferanten abgeben.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schaden durch unsachgemäßen oder unachtsamen Gebrauch;
- Schaden als Folge von Wartung oder Reparaturen durch Unbefugte;

## BENUTZUNG VON CLUB:

Öffnen Sie das Aluminiumetui und nehmen Sie Club aus dem Schaumstoff. Club hat lediglich einen einzigen Bedienungsknopf, darum ist Club sehr einfach im Gebrauch. Dieser Knopf dient als An-/Ausschalter und auch als Lautstärkereglер. Drehen Sie das Rädchen vorsichtig nach vorne, man fühlt dabei einen leichten Klick. Club ist eingeschaltet. Falls Sie die Lautstärke erhöhen wollen, drehen Sie das Rädchen vorsichtig noch weiter nach vorn, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.. Um Club auszuschalten drehen Sie das Rädchen soweit nach hinten, bis Sie ein leichtes Klicken fühlen. Das Rädchen lässt sich nicht weiter drehen, Club ist ausgeschaltet.

### In der Hand halten

Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer oder anderes Zubehör an. Die gewünschte Richtfunktion des Club wird erreicht, indem Sie das Mikrofonarray in Längsrichtung auf die gewünschte Geräuschquelle richten. Achten Sie dabei darauf, dass die Geräuschöffnungen nicht von den Fingern bedeckt werden.

### In den Tischhalter einsetzen

Schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer oder anderes Zubehör an. Die gewünschte Richtfunktion des Club wird erreicht, indem Sie Club in das Gummifüßchen setzen und durch Drehen auf die gewünschte Geräuschquelle richten.

### In den Ohrstöpsel einsetzen

Schieben Sie den Ohrstöpsel über das Array, genau wie auf der Abbildung. Das Steckerchen wird auf den Ausgang von Club gesteckt. Setzen Sie das Ganze auf Ihr Ohr, wobei das Gummihäkchen hinter das Ohr kommt und der Ohrstöpsel in das Ohr eingesetzt wird. Sie können am besten einige Male vor dem Spiegel üben. Schauen Sie in Richtung der gewünschten Geräuschquelle, hierdurch wird diese verstärkt. Falls ein Pfeifton oder Eigenresonanz auftritt, drücken Sie den Ohrstöpsel tiefer ins Ohr oder reduzieren Sie die Lautstärke. Es kann auch ein Spezialohrteil angefertigt werden, sodass die Lautstärke ohne Pfeifen oder Eigenresonanz auf maximal eingestellt werden kann.

### Gebrauch von Induktionshäkchen und Direct Input (DI)

Club kann an die meisten Hinter-dem-Ohrgeräte gekoppelt werden. Diese Koppelung kann induktiv mit dem Gebrauch von Induktionshäkchen, wobei die Hörgeräte auf dem T-Stand stehen, zustande gebracht werden. Die Induktionshäkchen setzen Sie dann über die Ohren, neben die Hörgeräte. Der Club wird danach in der Hand gehalten oder in das Füßchen auf dem Tisch gesetzt. Für den Gebrauch des Direct Input Eingangs von Hörgeräten muss ein Anschlusskabel für Hörgeräte beim entsprechenden Fabrikanten angeschafft werden. Die Koppelung wird mithilfe eines 3,5 mm Klinkesteckers am anderen Ende des Kabels hergestellt. Nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### Auswechseln der Batterien

Club ist mit einem Batterieanzeiger ausgestattet. Es ist das weiße Lämpchen oben auf dem Gerät.. Dieses Lämpchen leuchtet orange/rot auf, sobald die Batterien fast leer sind. Nehmen Sie 2 Zink-Air Batterien, Typ 13, und entfernen Sie die Aufkleber. Setzen Sie sie in der richtigen Position in den Halter. Der Halter muss vorsichtig geschlossen werden. Falls Sie viel Widerstand fühlen, schauen Sie dann nach, ob etwas im Wege ist und probieren Sie es erneut. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich nicht sicher sind. Falls Sie den Club jedoch nur selten verwenden, empfehlen wir Silberoxid-Batterien vom Typ 309. Diese Batterien laufen nicht aus, sind jedoch teurer und haben eine geringere Kapazität.

### Pflegehinweise

Club ist ein modernes Gerät, das mit großer Sorgfalt entworfen und produziert wurde. Gehen Sie sorgfältig damit um. Die folgenden Tipps ermöglichen Ihnen, den geltenden Garantieanspruch zu wahren und an diesem Produkt viele Jahre Freude zu haben:

- Halten Sie das Gerät und alles Zubehör fern von Kindern.
- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können Korrosion an den elektronischen Schaltungen verursachen.
- Verwenden Sie oder bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen oder schmutzigen Orten auf. Durch Staubansammlung kann die Funktion beeinträchtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen oder kalten Orten auf. Diese Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße und übermäßiges Schütteln.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien, Lösungs- oder Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, mit Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.



**Babble**  
Diekerstrasse 97  
42781 Haan  
Deutschland  
tel: 02129 347726  
www.babble.eu