

Hartelijk dank dat u voor Club heeft gekozen! In deze handleiding vindt u een beschrijving van Club en wordt een aantal tips voor het gebruik van Club gegeven.



Technische specificaties

- 4-elements arraymicrofoon
- Richtwerking DI 10dB
- Versterking 40 dB
- Ingebouwde compressor
- Maximale output 105 dB
- Frequentiebereik 400 - 5 kHz
- Gewicht 8 gram
- Lengte 9 cm
- 2 batterijen, type zink-lucht 13
- Aluminium opbergdoos



BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOORAF:

GEBRUIK CLUB VERSTANDIG

Club is bedoeld voor het verbeteren van de verstaanbaarheid van gesprekken in situaties waar dit bemoeilijkt wordt door omgevingsgeluid. Tevens kan Club gebruikt worden voor het versterken van geluid zoals in het theater of in huiselijke kring bij de televisie.

Club bevat zeer kleine onderdelen. Houdt Club in verband met verstikkingsgevaar buiten het bereik van kleine kinderen.

STEL HET GELUIDSNIVEAU NIET TE HOOG IN

Afgeraden wordt om Club in extreem luidruchtige omgevingen te gebruiken.

- Stel het geluidsniveau net voldoende hoog in voor een goede verstaanbaarheid;
- Suizende oren geven mogelijkerwijs een te hoog geluidsniveau aan. Verminder het geluidsniveau.

GEZONDHEID

Creaties in Techniek raadt u aan om uw oren regelmatig door een erkend audioloog te laten controleren.

Als u één van de volgende zaken ervaart, stop dan met het gebruik van Club totdat een audioloog uw oren heeft onderzocht:

- twijfel over de achteruitgang van uw gehoor;
- sterke verslechtering van het gehoor;
- overmatige opbouw van oorsmeer;
- bij overgevoeligheds of allergische reacties.
- bij infecties.

HYGIENE

Houd Club schoon. In verband met persoonlijke hygiëne, deel het gebruik van Club niet met andere personen. Veeg de oorplugs schoon met een antiseptisch middel zowel voor als na gebruik om infecties te voorkomen.

VERKEERSVEILIGHEID

Vanwege de isolerende werking van de oorplugs wordt afgeraden Club te gebruiken wanneer u zich bevindt in het verkeer, of in enige andere situatie waarin isolatie van het omgevingsgeluid tot gevaarlijke situaties kan leiden.

INTERFERENTIE

Club kan in principe beïnvloed worden door sterke interferentie signalen.

Gebruik Club niet tegelijkertijd met uw mobiele telefoon aan hetzelfde oor.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd servicepersoneel het apparaat repareren.

GARANTIE

Op Club wordt een volledige garantie voor de periode van 1 jaar gegeven. Indien u gebruik wenst te maken van de garantie dient Club te worden ingeleverd bij uw leverancier vergezeld van de originele aankoopbon.

Uitgesloten van de garantie zijn:

- schade door onoordeelkundig of onachtzaam gebruik;
- schade als gevolg van onderhoud of reparaties door onbevoegden;

Creaties in Techniek verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product Babble conform is aan de bepalingen van de volgende richtlijnen van de Raad; Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) (89/336/EEG; 92/31/EEG; 93/68/EEG) en Medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Copyright Creaties in Techniek 2008. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte daarvan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creaties in Techniek is verboden. In geen geval is Creaties in Techniek aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijk recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel.

HOE CLUB TE GEBRUIKEN:

Open de Aluminium opbergdoos en haal Club uit het schuim. Club bevat slechts één bedieningsknop, dit maakt Club zeer eenvoudig in gebruik. Deze knop betreft zowel de aan/uit schakelaar als volumeregelaar. Draai het wielje rustig naar voren, een lichte klik is hierbij voelbaar, Club is ingeschakeld. Indien een hoger volume gewenst is, draai dan het wielje verder naar voren, doe dit rustig totdat het gewenste niveau is bereikt. Het uitschakelen van Club wordt bereikt door het naar achteren draaien van het wielje totdat een lichte klik voelbaar is. Het wielje kan niet verder, Club is uitgeschakeld.

In de hand houden

Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon of een ander accessoire aan. De gewenste richtwerking van de Club wordt bereikt door de microfoonarray in de lengterichting op de gewenste geluidsbron te richten. Let er daarbij op dat de geluidsoeningen niet door de vingers worden bedekt.

Plaatsing in het tafelvoetje

Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon of een ander accessoire aan. De gewenste richtwerking van de Club wordt bereikt door Club in het rubbervoetje te plaatsen en door draaiing op van de gewenste geluidsbron te richten.

Plaatsing en afstelling van het oorrubber

Schuif het oorrubber over de array, zoals in de afbeelding. Het stekertje wordt op de uitgang van de Club gestoken. Er zijn 3 transparante opzetrubbertjes meegeleverd, het is belangrijk dat u de goede maat gebruikt anders wordt uw gehoorgang niet goed afgesloten en kan er rondzingen of een pijnlijk gevoel optreden. Begin met de middelste maat en plaats dit op het zwarte afdekrubber. Als u de volgende stappen doorlopen heeft en de afsluiting nog niet goed is, probeert u het nogmaals met een andere maat opzetrubbertje.

U kunt het steeltje van de luidspreker in de hoogte verschuiven om het oorrubber op uw oor aan te laten sluiten en de Club recht naar voren te laten wijzen. Door het steeltje met de luidspreker rond te draaien bepaalt u of u de Club op uw linker dan wel rechter oor wilt dragen. Het zwarte afdekrubber, met daarop het opzetrubbertje, is draaibaar. Hierdoor kunt u de geluidsoening precies voor uw gehoorgang plaatsen. Zie de kleine afbeelding hiernaast.

Plaats het geheel op het oor, waarbij het rubberen haakje achter het oor komt en het oordopje in het oor gezet wordt. Enige oefening voor een spiegel kan hierbij behulpzaam zijn. Door in de richting van de gewenste geluidsbron te kijken wordt deze versterkt. Als er fluiten of rondzingen optreedt plaatst u het opzetrubbertje dieper in het oor of neemt een andere maat. Als dat niet helpt loopt u de bovenstaande afstelprocedure nogmaals door. Er kan ook een speciaal oorstukje worden gemaakt zodat het volume op maximaal kan worden ingesteld zonder fluiten/rondzingen.

Gebruik van inductiehaakjes en direct input (DI)

Club kan worden gekoppeld aan de meeste Achter het Oor hoortoestellen. Deze koppeling kan inductief door het gebruik van inductiehaakjes, waarbij de hoortoestellen op de T-stand staan, tot stand komen. De inductiehaakjes plaatst u dan over de oren, naast de hoortoestellen. De Club wordt vervolgens in de hand gehouden of in het voetje op tafel geplaatst. Voor gebruik van de Direct Input ingang van hoortoestellen dient een aansluitkabeltje voor de toestellen te worden aangeschaft bij de fabrikant er van, de koppeling wordt gemaakt door middel van een 3,5 mm jackplug aan het andere uiteinde van het kabeltje. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Verwisselen van de batterijen

Club is voorzien van een batterij-indicator, dit is het witte lampje bovenop het toestel. Dit lampje licht oranje/rood op zodra de batterijen bijna leeg zijn. Gebruik 2 zink-lucht batterijen van het type 13, en verwijder de stickertjes. Plaats ze in de goede positie in het houderdje. Het houderdje dient voorzichtig te worden gesloten. Indien u veel weerstand voelt, kijk dan of er iets in de weg zit en probeer het opnieuw, neem bij twijfel contact met ons op. Als u de Club slechts incidenteel gebruikt is het gebruik van zilveroxide batterijen type 309 aan te bevelen. Deze batterijen lopen niet leeg, maar zijn duurder en hebben minder capaciteit.

Onderhoud

Club is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product:

- Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen kunnen corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan zich ophopen, de werking kan hierdoor verminderen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het warm of koud is. Deze temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en overmatig schudden.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat af met een zachte doek die zeer licht is bevochtigd met een oplossing van water en zeep.



Creaties in Techniek
van Diemenstraat 410
Unit -1.16
1013 CR Amsterdam
tel: 020 6383788
fax: 020-6223557
info@babble.nl
www.babble.nl